

## Памятка. КардиРу. Подключение к сети Wi-Fi

Если прибор КардиРу после включения питания не обнаружил известные сети Wi-Fi, то прибор создаст свою **точку доступа** Wi-Fi для настройки и ввода новых сетей Wi-Fi, которые будут использоваться для передачи исследования с прибора в личный кабинет пациента. Алгоритм настройки Wi-Fi подключения следующий.

1. Включить прибор КардиРу. Внимание! В приборе не должно быть записанных и не переданных исследований (должен моргать только «индикатор 1» красным, «индикатор 4» не должен моргать синим). Если моргает синим «индикатор 4», то нужно сбросить исследования удерживая кнопку на приборе **7 секунд** до выключения прибора и включить прибор повторно.
2. Найти с компьютера, телефона или другого устройства (называем далее ПК) Wi-Fi сеть прибора с именем **kardiru.NNNN**, где NNNN последние 4 цифры серийного номера прибора (напечатан на этикетке устройства после символа [SN] с обратной стороны прибора). Пример сети **kardiru.2001**. ПК будет использоваться далее для настройки прибора КардиРу.
3. Подключиться с ПК к этой сети с именем **kardiru.NNNN**. Пароль для подключения **1122334455**.
4. После подключения ПК к сети прибора КардиРу внешний интернет у ПК станет недоступен и ПК окажется в одной сети с прибором.
5. Открыть на ПК любой Интернет-браузер, например Google Chrome. В браузере открыть строчку <http://NNNN.local/> где NNNN – серийный номер прибора. Обратите внимание, что префикс «http», а не «https» (распространенная ошибка).
6. Откроется консоль настройки прибора и схема наложения электродов.
7. Справа сверху в консоли, которая открылась на ПК, кнопка настройки прибора. Нажать эту кнопку.
8. Нажать кнопку «**Показать дополнительные настройки**».
9. Найти группу настроек «Wi-Fi» и нажать кнопку «**Изменить**».
10. В настройках задать действующую Вашу сеть Wi-Fi для передачи исследований и прописать пароль для подключения к этой сети и нажать кнопку «**Запомнить**».
11. Закрыть браузер.
12. Выключить прибор удерживая **7 секунд** кнопку на приборе или дождаться пока прибор выключиться самостоятельно по таймауту.
13. Настройка завершена!
14. Чтобы проверить подключение к указанной сети Wi-Fi нужно включить прибор КардиРу повторно.
15. После включения прибора КардиРу, прибор попытается подключиться по указанному логину и паролю к настроенной сети.
16. Если прибор не смог подключиться в указанной сети, то прибор произведет тройной сигнал (тройной писк) через несколько секунд после включения. В этом случае нужно повторно провести настройку и проверить правильность указания логина и пароля к сети Wi-Fi.
17. Если прибор КардиРу подключился к сети, то «индикатор 4» на приборе будет коротко мигать (моргать) синим после включения и прибор не будет создавать больше точку доступа.

Подробнее с инструкцией по определению сетей Wi-Fi можно ознакомиться в руководстве пользователя по адресу <http://www.kardi.ru/files/manual-kardiru12.pdf>